

Diamantstreifen breit, einseitige Belegung

Diamond strips, wide coated on one side

Strips diamantés larges couverte sur une seule face

Labor • Laboratory • Laboratoire



FS6-M, FS6-F, FS6-SF

Eine täglich wiederkehrende Situation: Nach dem Brand sind die gestalteten Kontaktpunkte noch zu stark ausgeprägt und es erfordert viel Geduld und Aufwand diese zu bearbeiten, um geschlossene, flächige Kontakte zu erzielen.

A routinely recurring situation: After firing, the contact points are too pronounced and a lot of patience and effort is required in preparing them to attain closed, surface area contacts.

Une situation quotidienne et répétitive: Après la cuisson, les points de contact sont encore trop forts et il faut beaucoup de patience et d'énergie pour les ajuster afin d'obtenir une surface de contact correcte.

Die einseitig belegten Diamantstreifen in 6mm Breite erlauben die gezielte Gestaltung des perfekten Kontaktpunktes in kurzer Zeit. Der Diamantstreifen wird zwischen die Kronen geführt und durch leichtes mehrmaliges Ziehen bewegt, bis der Störkontakt reduziert ist und das optimale Ergebnis erreicht wurde.

The 6 mm wide diamond strip, coated on one side, precisely prepares a perfect contact point in minimum time. The diamond strip is placed between the crowns and moved back and forward several times until the high spot is reduced and an optimum contact point is attained.

Le strip diamanté sur une seule face de 6 mm de large permet de régler le point de contact parfait en peu de temps. Le strip diamanté est introduit entre les couronnes et est actionné par un léger mouvement de va-et-vient jusqu'à réduction du contact prématuré afin d'obtenir un résultat optimal.

Drei unterschiedliche Körnungen vereinfachen die situationsbedingte Auswahl je nach Stärke des Frühkontakts. Perfekte Interdentalfächen die jeder Zahnarzt und Patient genießen wird.


There is a choice of three different grit sizes according to the situation and depending on the amount of premature contact. Perfect interdental surfaces that any dentist or patient would be pleased with.

Trois granulométries différentes permettent un choix simplifié dépendant de la situation selon l'importance du contact prématuré. Des surfaces interdentaires parfaites qui satisferont chaque praticien et patient.



Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

Stärke/Thickness/Grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/Largeur (mm)	6,0	6,0	6,0
Länge/Length/Longueur (mm)	147,0	147,0	147,0

 10 REF

 FS6-M	
 FS6-F	
 FS6-SF	

 M	Blau Farbkodierung/Colour Code Blue/Code Couleur bleue	Standard/Standard/Standard	37 - 44 µm	ISO No. 524
 F	Roter Farbkodierung/Colour Code Red/Code Couleur rouge	Fein/Fine/Fin	30 - 40 µm	ISO No. 514
 SF	Gelbe Farbkodierung/Colour Code Yellow/Code Couleur jaune	Superfein/Superfine/Superfin	10 - 20 µm	ISO No. 504