

Präparation von Frontzahn- und Zahnhalskavitäten (Klassen III, IV und V)
Preparation of anterior and cervical cavities (Classes III, IV and V)
Préparation des cavités antérieures et cervicales (classes III, IV et V)



Eröffnen und Erweitern (Klasse III)
Opening and amplification (Class III)
Ouverture et amplification (classe III)

806 314 233 524 008-012
 (830 - 008/010/012 M)



Präparation in Pulpanähe
Preparation near the pulp
Préparation proche de la pulpe

500 204 001 001 010
 (H1S - 010)



Finieren
Finishing
Finition

806 314 233 504 008/010
 (830 - 008/010 SF)




Abtragen der Schneidekante (Klasse IV)
Incisal reduction (Class IV)
Réduction incisive (classe IV)

806 314 156 524 012
 (835KR - 012 M)





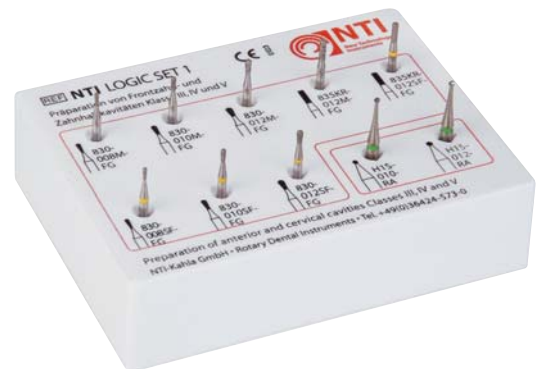


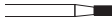




Zahnhalspräparation (Klasse V)
Cervical preparation (Class V)
Préparation cervicale (classe V)

806 314 233 524 008/010
 (830 - 008/010 M)



NTI Logic Set 1

- | | |
|------------------------|---|
| 830-008M -FG |  |
| 830-008SF -FG |  |
| 830-010M -FG |  |
| 830-010SF -FG |  |
| 830-012M -FG |  |
| 830-012SF -FG |  |
| 835KR-012M -FG |  |
| 835KR-012SF -FG |  |
| H1S-010-RA |  |
| H1S-012-RA |  |

Präparation in Pulpanähe und Finieren wie bei Klasse III
Preparation near the pulp and finishing: same as with Class III
Préparation proche de la pulpe et finition comme pour la classe III

Logic-Set 2

Präparation von Seitenzahnkavitäten zur Versorgung mit plastischen Füllungsmaterialien (Klassen I, II und V)
Preparation of premolar and molar cavities for composite filling materials (Classes I, II and V)
Préparation des cavités des dents latérales en vue d'une obturation avec des composites (classes I, II et V)




Eröffnen und Erweitern (Klasse I)
Opening and amplification (Class I)
Ouverture et amplification (classe I)

806 **314** 233/234 524 010-014
 (830 - 010/012 M, 830L - 014 M)



Erweitern (Klasse II)
Amplification (Class II)
Amplification (classe II)

806 **314** 233/234 524 010-014
 (830 - 010/012 M, 830L - 014 M)

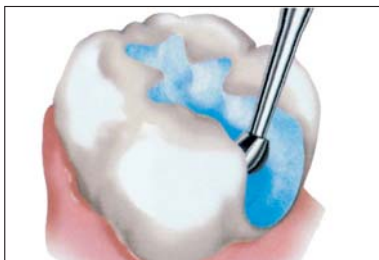

Präparation in Pulpanähe
Preparation near the pulp
Préparation proche de la pulpe

500 **204** 001 001 010/018
 (H1S - 010/018)



Finieren
Finishing
Finition


806 **314** 233/234 514 010-014
 (830 - 010/012 F, 830L - 014 F)



Zahnhspräparation (Klasse V)
Cervical preparation (Class V)
Préparation cervicale (classe V)

806 **314** 233 524 010
 (830 - 010 M)

Präparation in Pulpanähe und Finieren wie bei Klasse I
Preparation near the pulp and finishing: same as with Class I
Préparation proche de la pulpe et finition comme pour la classe I

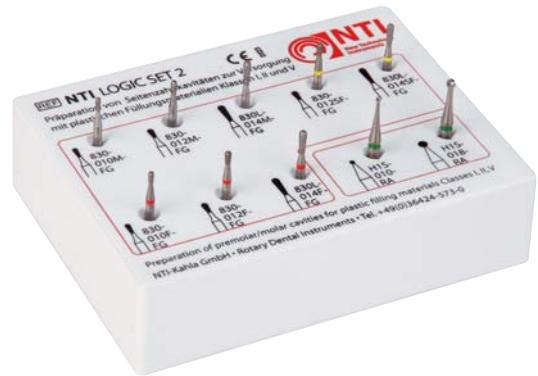

REF NTI Logic Set 2

- 830-010M -FG
- 830-010F -FG

- 830-012M -FG
- 830-012F -FG

- 830-012SF -FG

- 830L-014M -FG
- 830L-014F -FG
- 830L-014SF-FG

- H1S-010-RA

- H1S-018-RA


Präparation von Seitenzahnkavitäten zur Versorgung mit vorgefertigten Einlagen (Inlays/Onlays)
Preparation of premolars and molars for inlays and onlays
Préparation des cavités des dents latérales en vue d'une obturation avec des matériaux préfabriqués (inlays/onlays)

Übergang vom Kavitätenboden zur Kavitätenwand mit kleiner Rundung
Small-bevel transition from cavity base to cavity wall
Transition du fond de la cavité au bord de la cavité avec un faible arrondissement



Eröffnen und Erweitern
Opening and amplification
Ouverture et amplification

806 **314** 233/234 524 012/014
 (830 - 012 M, 830L - 014 M)

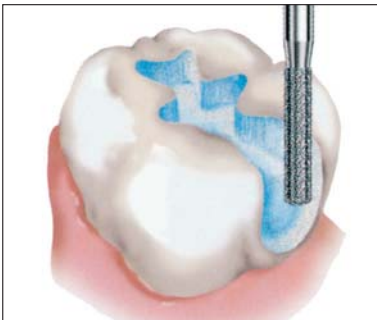


Erweitern und Präparation der Endform
Amplification and preparation of the final shape
Amplification et préparation de la forme finale

806 **314** 156/157 524 012/014
 (835KR - 012 M, 836KR - 014 M)




Präparation in Pulpanähe
Preparation near the pulp
Préparation proche de la pulpe

500 **204** 001 001 012/023
 (H1S - 012/023)

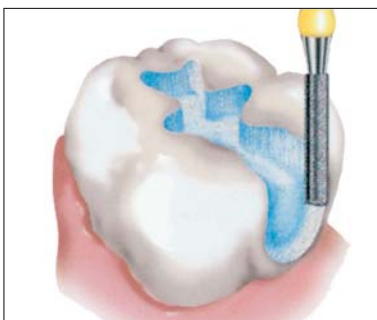



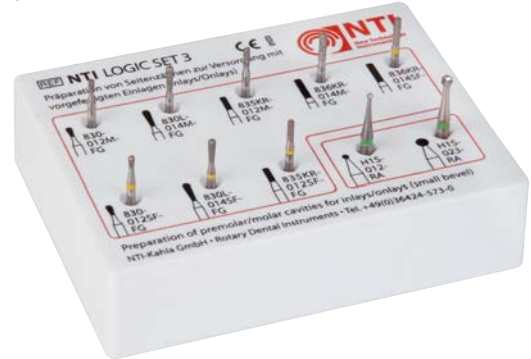


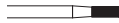




Finieren
Finishing
Finition

806 **314** 156/157 504 012/014
 (835KR - 012 SF, 836KR - 014 SF)



REF NTI Logic Set 3 

830-012M -FG	
830-012SF -FG	
830L-014M -FG	
830L-014SF -FG	
835KR-012M -FG	
835KR-012SF -FG	
836KR-014M -FG	
836KR-014SF -FG	
H1S-012-RA	
H1S-023-RA	

Logic-Set 4

Präparation von Seitenzähnen zur Versorgung mit vorgefertigten Einlagen (Inlays/Onlays)

Preparation of premolars and molars for inlays and onlays

Préparation des cavités des dents latérales en vue d'une obturation avec des matériaux préfabriqués (inlays/ onlays)

Übergang vom Kavitätenboden zur Kavitätenwand mit großer Rundung


Large-bevel transition from cavity base to cavity wall

Transition du fond de la cavité au bord de la cavité avec un large arrondissement



Eröffnen und Erweitern
Opening and amplification
Ouverture et amplification

806 **314** 233/234 524 012/014
(830 - 012 M, 830L - 014 M)

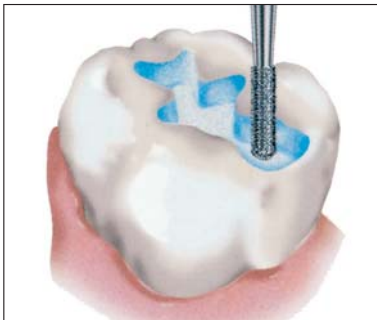

Erweitern und Präparation der Endform
Amplification and preparation of the final shape
Amplification et préparation de la forme finale

806 **314** 137/140 524 010/014
(838 - 010/014 M, 880 - 014 M)




Präparation in Pulpanähe
Preparation near the pulp
Préparation proche de la pulpe

500 **204** 001 001 010/016
(H15 - 010/016)



Finieren
Finishing
Finition

806 **314** 137/140 514 010/014
(838 - 010/014 F, 880 - 014 F)

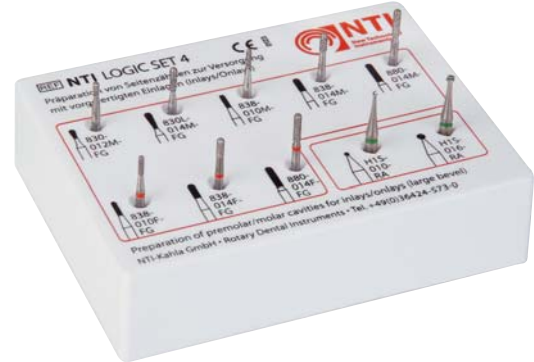

REF NTI Logic Set 4

830-012M -FG	
830L-014M -FG	
838-010M -FG	
■ 838-010F -FG	
838-014M -FG	
■ 838-014F -FG	
880-014M -FG	
■ 880-014F -FG	
■ H15-010-RA	
■ H15-016-RA	

Präparation von Zähnen zur Versorgung mit Voll- und Metall-Keramikkronen

Preparation of teeth for full and metal-ceramic crowns

Préparation des dents latérales pour la mise en place des couronnes complètes ou céramico-métalliques

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

Präparationsform: Abgerundete Stufe • Frontzähne / Preparation shape: Rounded shoulder • Anterior teeth /

Forme de préparation: Epaulement arrondi * Dents antérieures



Abtragen der Schneidekante

Incisal reduction

Réduction incisive

806 314 157/158 524 010-014

(836KR - 010/012M, 837KR - 012/014 M)



Präparation in Approximalbereich

Preparation in approximal area

Préparation dans le domaine proximal

806 **314** 199 524 012

(850 - 012 M)



Umfang- und Stufenpräparation

Contour and shoulder preparation

Préparation de contour et d'épaulement

806 **314** 157/158 524 010-014

(836KR - 010/012 M, 837KR - 012/014 M)



Präparation palatinaler und lingualer Flächen

Preparation of palatinal and lingual surfaces

Préparation des surfaces palatines et linguales

806 **314** 263 524 025

(369 - 025 M)



Abrunden der Kanten

Rounding-off edges

Arrondissement des bords incisifs

806 **314** 263 524 025

(369 - 025 M)



Finieren

Finishing

Finition

806 **314** 157/158 514 010-014

(836KR - 010/012 F, 837KR - 012/014 F)

Logic-Set 5

Präparation von Zähnen zur Versorgung mit Voll- und Metall-Keramikkronen

Preparation of teeth for full and metal-ceramic crowns

Préparation des dents latérales pour la mise en place des couronnes complètes ou céramico-métalliques


Präparationsform: Abgerundete Stufe • Seitenzähne / Preparation shape: Rounded shoulder • Premolars/molars /

Forme de préparation: Epaulement arrondi • Dents antérieures postérieures




Abtragen der Okklusalfäche
Reduction of the occlusal surface
Réduction de la surface occlusale

806 314 157/158 524 012/014
(836KR - 012 M, 837KR - 012/014 M)

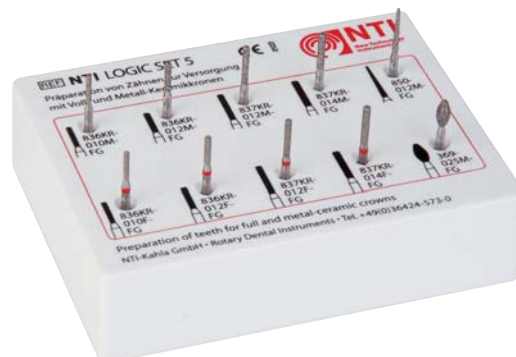


Präparation im Approximalbereich
Preparation in approximal area
Préparation dans le domaine proximal

806 314 199 524 012
(850 - 012 M)

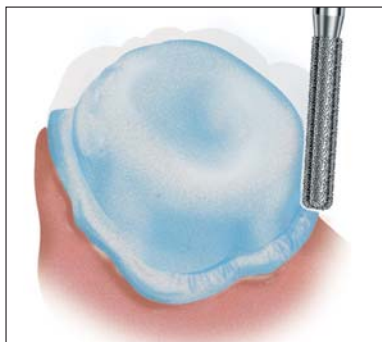

Umfang- und Stufenpräparation
Contour and shoulder preparation
Préparation de contour et d'épaulement

806 314 157/158 524 010 - 014
(836KR - 010/012 M, 837KR - 012/014 M)

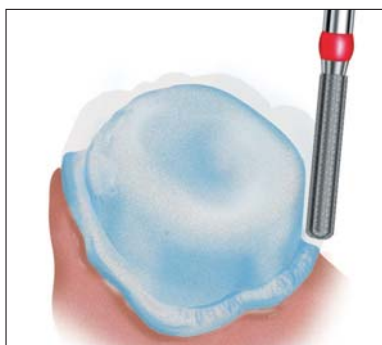

Finieren
Finishing
Finition

806 314 157/158 514 010 - 014
(836KR - 010/012 F, 837KR - 012/014 F)

REF NTI Logic Set 5

- 836KR-010M -FG
- 836KR-010F -FG
- 836KR-012M -FG
- 836KR-012F -FG
- 837KR-012M -FG
- 837KR-012F -FG
- 837KR-014M -FG
- 837KR-014F -FG
- 850-012M-FG
- 369-025M-FG

Präparation von Zähnen zur Versorgung mit Vollguß- oder Kunststoff-Verblendkronen

Preparation of teeth for full cast or composite veneer crowns

Préparation des dents pour la mise en place des couronnes coulées ou couronnes à facettes en résine acrylique


Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

Präparationsform: Hohlkehle • Frontzähne / Preparation shape: Chamfer • Anterior teeth / Forme de préparation: Chanfrein/ Dents antérieurs



Abtragen der Schneidekante
Incisal reduction
Réduction incisive

806 **314** 288/289 524 012/014
(877 - 012 M, 878 - 014 M)

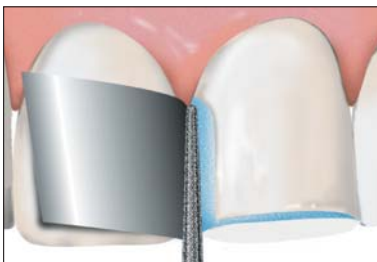

Präparation in Approximalbereich
Preparation in approximal area
Préparation dans le domaine proximal

806 **314** 199 524 012
(850 - 012 M)



Umfang- und Hohlkehlenpräparation
Contour and chamfer preparation
Préparation de contour et d'épaulement

806 **314** 287/288/289 524 009 - 014
(876 - 009 M, 877 - 012 M, 878 - 014 M)
806 **314** 296/297/298 524 012/014
(876K - 012 M, 877K - 012 M, 878K - 014 M)



Präparation palatinaler und lingualer Flächen
Preparation of palatinal and lingual surfaces
Préparation des surfaces palatines et linguales

806 **314** 033 524 021 (899 - 021 M)



Abrunden der Kanten
Rounding-off edges
Arrondissement des bords incisifs

806 **314** 033 524 021
(899 - 021 M)



Finieren
Finishing
Finition

806 **314** 288/289 514 012-014
(877 - 012 F, 878 - 014 F)


Logic-Set 6

Präparation von Zähnen zur Versorgung mit Vollguß- oder Kunststoff-Verblendkronen

Preparation of teeth for full cast or composite veneer crowns

Préparation des dents pour la mise en place des couronnes coulées ou couronnes à facettes en résine acrylique

Präparationsform: Hohlkehle • Seitenzähne / Preparation shape: Chamfer • Premolars/molars / Forme de préparation: Chanfrein/ Dents postérieures

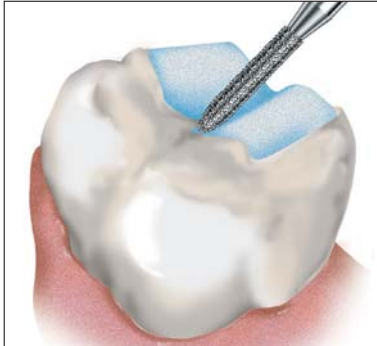


Abtragen der Okklusalfläche
Reduction of the occlusal surface
Réduction de la surface occlusale

806 314 288/289 524 012/014
(877 - 012 M, 878 - 014 M)




Präparation im Approximalbereich
Preparation in approximal area
Préparation dans le domaine proximal

806 314 199 524 012
(850 - 012 M)

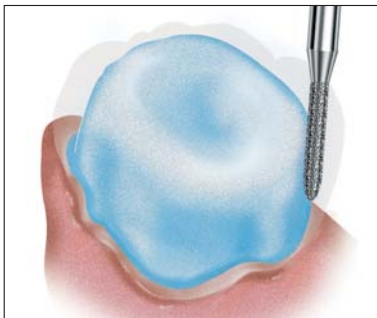


Umfang- und Hohlkehlenpräparation
Contour and chamfer preparation
Préparation de contour et d'épaulement

806 314 287/288/289 524 009 - 014
(876 - 009 M, 877 - 012 M, 878 - 014 M)
806 314 296/297/298 524 012/014
(876K - 012 M, 877K - 012 M, 878K - 014 M)

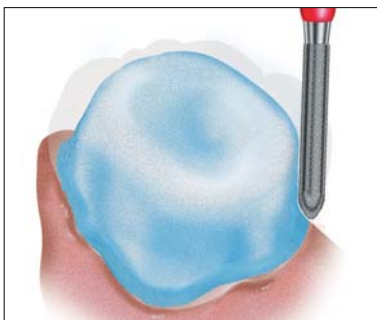

Finieren
Finishing
Finition

806 314 288/289 514 012/014
(877 - 012 F, 878 - 014 F)

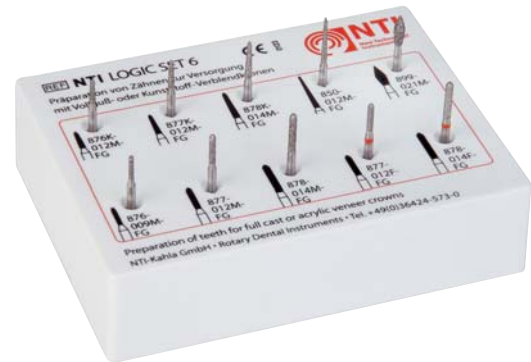

NTI Logic Set 6

850-012M -FG

876-009M -FG

876K-012M-FG

877-012M -FG

877-012F -FG

877K-012M-FG

878-014M -FG


878-014F -FG

878K-014M-FG

899-021M -FG

Formen und Finieren
Contouring and finishing
Mise en forme (Contouring) et finition

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

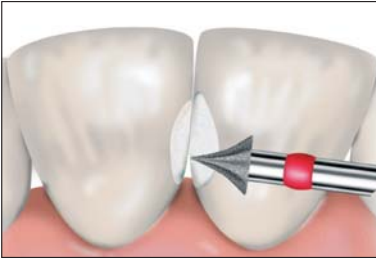

806 **314** 466 514 018/031
(833 - 018/031 F)




806 **314** 197 504 014
(855 - 014 SF)



806 **314** 197 504 014
(855 - 014 SF)



806 **314** 277 514 016
(379 - 016 F)

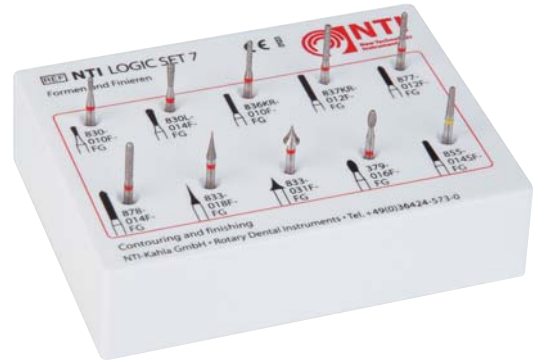

REF NTI Logic Set 7

- **379-016F -FG**

- **830-010F -FG**

- **830L-014F-FG**

- **833-018F -FG**

- **833-031F -FG**

- **836KR-010F-FG**

- **837KR-012F-FG**

- **855-014SF-FG**

- **877-012F -FG**

- **878-014F -FG**